



内視鏡用送水装置WP2S用[※]

ポンプヘッドクランプ

◆内視鏡用送水装置WP2S[※]のポンプヘッドに装着し送水性能を維持・改善するための補助的治具です

※内視鏡用送水装置WP2Sは、ORTメディカル株式会社が製造販売する送水装置です

【着脱方法】

真っすぐ差し込むと
「カチッ」と音が鳴ります

ツメを手前に倒して、
下から抜くように外します



(1)ポンプヘッドクランプの装着

- ①クランプの上下に注意して、ポンプヘッドを挟む様に、中央付近に真っすぐ挿し込みます。
- ②「カチッ」と音が鳴るところまで、しっかりと挿し込んでロックしてください。

(2)ポンプホルダーの外し方

- ①クランプ上部のツメを手前に倒すとロックが緩みます。
- ②ポンプヘッドの下方方向に落としながらポンプヘッドクランプを抜いて外してください。

仕様

製品名	型式	包装単位	希望小売価格	備考
ポンプヘッドクランプ	MF-PHC1	1個	15,000円/個	内視鏡用送水装置 WP2S用

- 注意事項
- 1)本製品はステンレス製です。
 - 2)変形や破損等の異常が認められた場合は使用しないでください。
 - 3)形状および仕様は予告なく変更する場合があります。